

**3M** Science.  
Applied to Life.™

# リライエックス™ ルーティングプラス

合着用グラスアイオノマー系レジンセメント

RelyX™ Luting Plus

## 光照射5秒

余剰セメントを一塊のまま除去できます。



歯科用合着・接着材料 I

保険点数

**17**点

本情報は、2018年3月現在のものです。

余剰セメントの除去に時間を費やしていませんか。



# 各面 光照射5秒。




各面  
光照射  
5秒

一塊のまま  
除去

写真提供:東京都開業 佐氏 英介 先生

余剰セメントを一塊のまま除去できます。

余剰セメントの除去方法を選択できます。

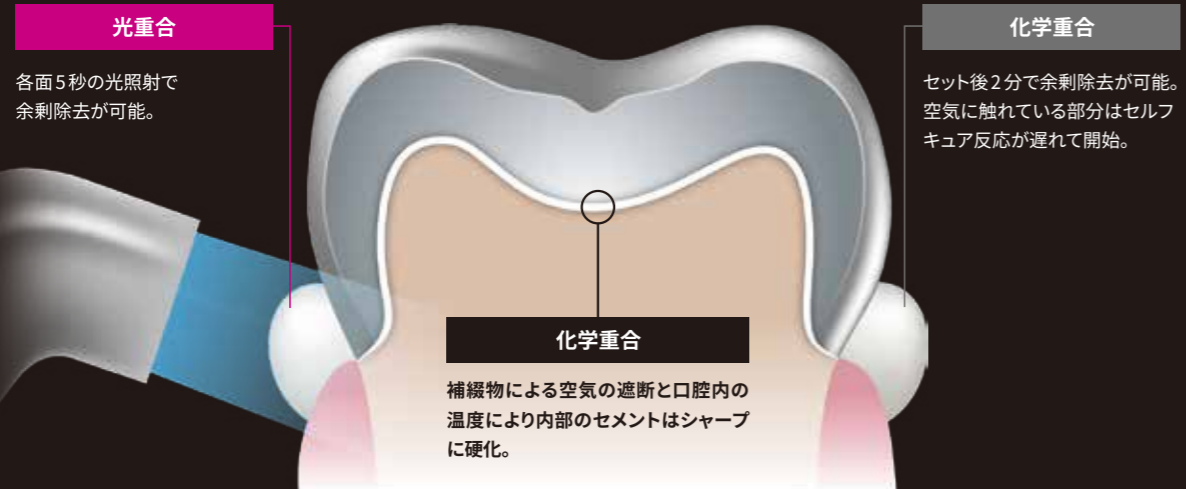

## スピーディなセメンテーションを実現

**暫間クラウンの除去と支台歯清掃**  
暫間クラウンを撤去し、支台歯に付着している仮着セメントを完全に取り除きます。

**採取**  
レバーを1~2回押すだけ。誰でも簡単・確実に採取できます。

**練和 (20秒)**  
クリーミーなペーストで簡単に練和できます。

**塗布 (操作余裕時間は2分30秒)**  
適度なチキソトロピー性で、セメントが垂れずに塗布できます。

**セット**  
セメントフローが良いため、補綴物が抵抗なく支台歯に納まります。


**光照射**  
余剰セメント除去のため各面5秒光照射します。化学重合の際はセット後2分待ちます。

**余剰セメント除去**  
硬化した余剰セメントはゴム状の弾力性を持ち、探針などで一塊で除去できます。

**最終硬化**  
セット後5分で最終硬化完了。

写真提供:東京都開業 佐氏 英介 先生

## 余剰除去までのチェアタイムを大幅に短縮

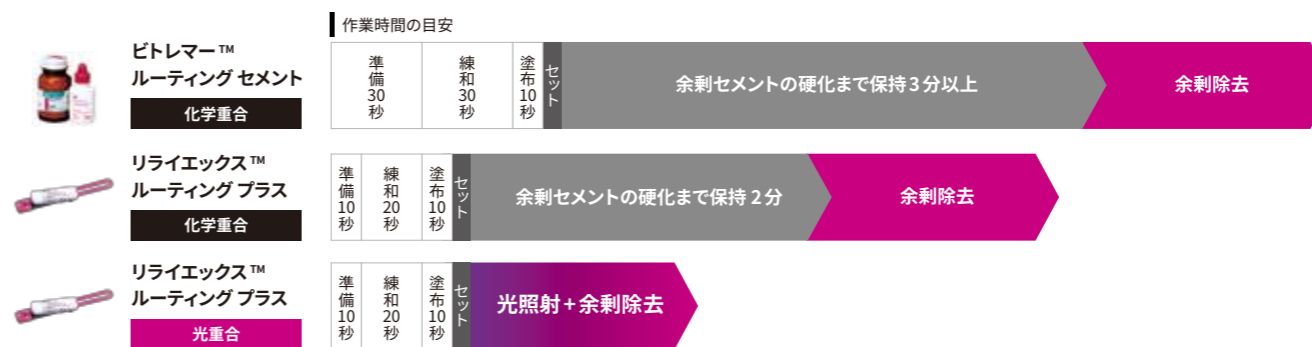

リライエックス™ ルーティング プラスは、口腔内セット後5分で最終硬化します。

空いた時間を有効活用。 次のチェアへ カルテの記入 片付け **が可能になります。**

## 光照射が有効な症例

**Case.1** 唾液の多い下顎臼歯部のセット

写真提供:福岡県開業 松永 興昌 先生  
唾液による影響を受ける前にすばやく余剰セメントを硬化除去できます。

**Case.2** ブリッジのセット

写真提供:東京都開業 大谷 一紀 先生  
ポンティックの下や鼓形空隙の余剰セメントを半硬化の状態ですばやく除去できます。

**Case.3** 連続した補綴物のセット

写真提供:福岡県開業 松永 興昌 先生  
余剰セメントの硬化が進みやすい多数歯セットの場合でも、硬化をコントロールできます。

リライエックス™ ルーティング プラス

# 新発売キャンペーン

キャンペーン期間  
2018年4月2日(月)  
～6月29日(金)

今回のキャンペーンでは、リライエックス™ ルーティング プラスを収納する専用ケースを組み合わせてご提供いたします。



リライエックス™ ルーティング プラス



リライエックス™ ルーティング プラス 専用ケース



リライエックス™ ルーティング プラス  
トライアルパック (1本パック)



内容

- ・クリッカー™ ディispenser (11g) × 1本
- ・練板紙 × 1冊
- ・専用ケース × 1個

製品番号: 3525TKA

キャンペーン希望医院価格: **6,800円**

リライエックス™ ルーティング プラス  
スタンダードパック (2本パック)



内容

- ・クリッカー™ ディispenser (11g) × 2本
- ・練板紙 × 2冊
- ・専用ケース × 1個

製品番号: 3525A

キャンペーン希望医院価格: **12,000円**

リライエックス™ ルーティング プラス  
ジャンボパック (5本パック)



内容

- ・クリッカー™ ディispenser (11g) × 5本
- ・練板紙 × 2冊
- ・専用ケース × 1個

製品番号: 3525JPA

キャンペーン希望医院価格: **27,500円**

## セメントの使い分け

○: 使用可能です —: 使用できません

セメントの使い分け	CAD/CAM レジンブロック インレー/アンレー/ クラウン (CAD/CAM 冠)	メタル インレー/アンレー/ クラウン/ブリッジ/コア	ジルコニア クラウン/ブリッジ
リライエックス™ ルーティング プラス 合着用ガラスアイオノマー系レジンセメント	—	○	○
リライエックス™ アルティメット レジン セメント 歯科接着用レジンセメント	○	○	○
リライエックス™ ユニセム 2 オートミックス 歯科接着用レジンセメント	○※1	○	○

歯冠長が短いなど、保持形態の付与が困難な場合は、より接着力の高いセメントをお奨めします。

※1 リライエックス™ セラミック プライマーを併用してください。

この表は、代表的な症例に関する内容になります。各症例毎に歯質の状態や補綴物の状態に応じて、セメントを選択いただくことをお奨めします。

販売名: リライエックス ルーティング プラス (歯科合着用ガラスポリアルケノート系レジンセメント) 認証番号: 229AKBZX00036000

販売名: リライエックス アルティメット レジン セメント 認証番号: 225AKBZX00136000 / 販売名: リライエックス ユニセム 2 オートミックス 認証番号: 223AKBZX00006000

販売名: リライエックス セラミック プライマー 認証番号: 220AKBZX00144000



スリーエム ジャパン株式会社  
ヘルスケアカンパニー 歯科用製品事業部

Web

3M 歯科



<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

3M コールセンター ☎0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。

※掲載の内容、保険点数、およびキャンペーン希望医院価格は、2018年3月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3M、RelyX、リライエックス、クリッカーは、3M社の商標です。 Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved. DEN-1557-AJ (031855) DN/DN