

フィルテック™ シュープリーム ウльтра フロー コンポジットレジン

光重合型低粘度ナノファイラー コンポジットレジン

バリューパック キャンペーン

キャンペーン期間：2018年3月1日(木)～4月27日(金)




セット内容.01

フィルテック™ シュープリーム ウльтра フロー コンポジットレジン バリューパック (同色3本セット) ※アソートパックのみA2、A3、A3.5の各1本ずつをセット



くさび状欠損
充填前

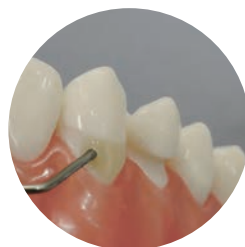

程良い粘稠度で
豊隆部デザインが
整いやすい



ナノファイラーにより
簡単な研磨で艶が
できます


セット内容.02

クリンプロ™ クリーニング ペースト PMTC用 ミニチューブ (10g) ×1本




「クリーニング」と「仕上げ」を1本で!


治療終了後の定期的なメンテナンス用としてご使用ください。

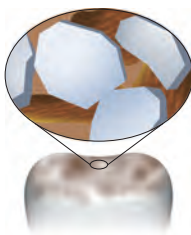

3M独自の研磨剤配合で
プラーク、着色を除去。

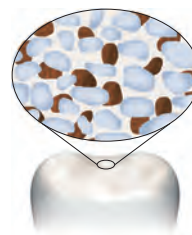

研磨粒子が徐々に砕け、
歯面を優しくクリーニング。

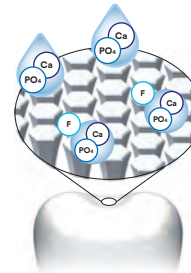

粒子が砕けてなめらかになった
研磨剤とフッ化物、リン酸、
カルシウムで仕上げ研磨。

F：フッ化物 PO₄：リン酸 Ca：カルシウム

セット内容	製品番号	
<ul style="list-style-type: none"> ● シリンジ 2g × 3本 ● 注入チップ × 20個 ● クリンプロ™ クリーニング ペースト PMTC用 ミニチューブ (10g) × 1本 	6032A1TP (A1 ボディシェード)	6032A2TP (A2 ボディシェード)
	6032A3TP (A3 ボディシェード)	6032A3.5TP (A3.5 ボディシェード)
	6032A4TP (A4 ボディシェード)	6032ASTP (アソートバリューパック A2、A3、A3.5)


 単品製品3本
10,200円
 希望医院価格 (本体価格)

+



 330円相当
 (10g)

キャンペーン希望医院価格 (本体価格)

8,130円

単品購入よりも
2,400円
お得

サッと流れてピタッと留まるので、これ1本で多様な症例に対応!

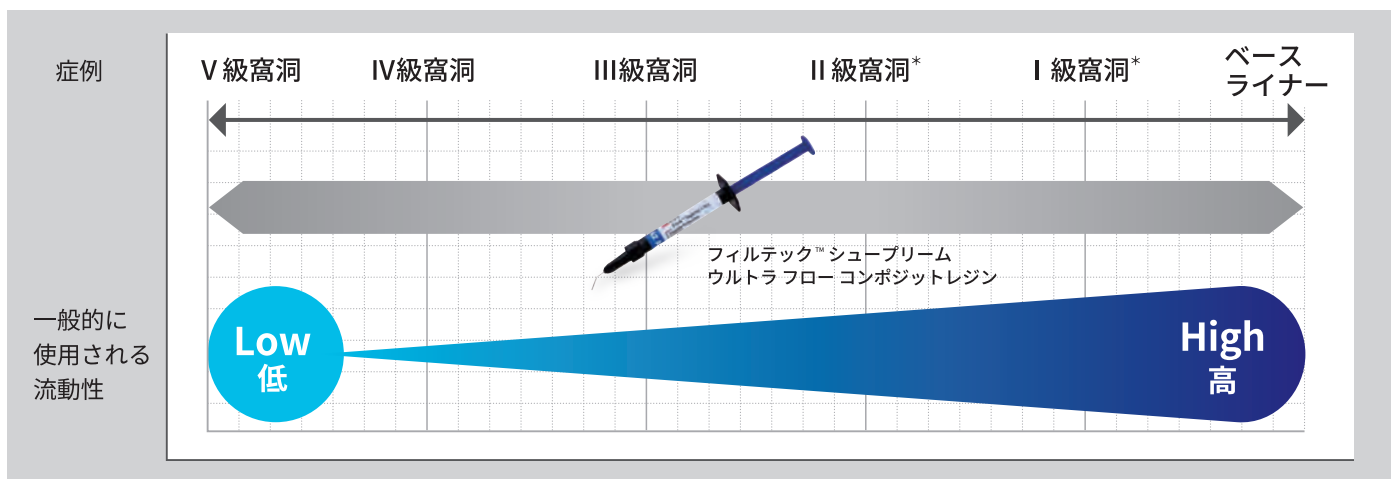

*咬頭を除く

主訴

3の咬耗に起因する顎関節症及び審美障害

臨床写真提供: 高橋 英登 先生 (井荻歯科医院)

1 術前

2 歯面処理

接着阻害因子除去のため、ラウンドバーで一層削除する。また、着色がある場合は着色層を除去する。その後、スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブを用いてボンディング処理を行う。

3 フィルテック™ シューブリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン充填 (OA3)

残った着色層を遮蔽するためにまずOA3を充填する。

4 フィルテック™ シューブリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン充填 (A1)

A1を充填する

5 術後

形態修正・咬合調整を行い研磨を行う。周囲のシェードと問題なく調和しており、機能的、そして審美的に良好な結果をもたらすことが可能である。

関連製品

本製品をより効果的に使っていただくために、以下の製品との組み合わせもご検討ください。



スコッチボンド™ ユニバーサル アドヒーシブ

この1本で9つの症例に使える、新しい1ステップの接着材です。
製品番号 (ボトルタイプ): 41258
希望医院価格: 12,000円



クリンプロ™ クリーニング ペースト PMTC用

クリーニングから仕上げまで、1本で対応可能なPMTCペーストです。
製品番号: 8241
希望医院価格: 1,680円

販売名: フィルテック シューブリーム ウルトラ フロー コンポジットレジン 認証番号: 222AKBZX00110000 / 販売名: クリンプロ クリーニング ペースト PMTC用 届出番号: 13B1X10109000259
販売名: スコッチボンド ユニバーサル アドヒーシブ 認証番号: 224AKBZX00054000



スリーエム ジャパン株式会社
ヘルスケアカンパニー 歯科用製品事業部

Web

3M 歯科



<http://www.mmm.co.jp/hc/dental/>

3M コールセンター ☎0120-332-329

※受付時間/9:00~17:00 月~金 (土・日・祝を除く)

※フリーダイヤルが繋がらない場合は、03-6409-3157をご利用ください。

※掲載の内容、およびキャンペーン希望医院価格は、2018年2月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
※キャンペーン品は、数量限定となっております。予定数量に達した場合は、期間中でも終了する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

3M、フィルテック、クリンプロ、スコッチボンドは、3M社の商標です。

Please Recycle. Printed in Japan. © 3M 2018. All Rights Reserved. DEN-1558-AJ (021880) DN/DN