

この機会に  
AP自動練和システム  
の導入を考えて  
みませんか？

# 新規導入 キャンペーン

2021年 10/21 [木] > 2022年 3/18 [金]

速い!

簡単!

キレイ!

歯科用印象材混こう器

## トクヤマ APミキサーⅢ

歯科用印象材混こう器

### トクヤマAPミキサーⅢ セット

標準医院価格 **¥413,000**

(一般医療機器) 届出番号08B2X00011000114

歯科用アルギン酸塩印象材

### トクヤマAP-1セット

ファースト、  
ノーマル、  
スロー  
1種類選択

ペースト



標準医院価格 **¥27,500**

(管理医療機器) 認証番号220AFBZX00071000

アルギン酸塩印象材用接着材

### トクヤマ アルジボンド セット



標準医院価格 **¥4,200**

アルギン酸塩印象材用清掃材

### トクヤマ APトレークリーナー

トクヤマAP-1を  
収縮軟化させるタイプの  
液体トレークリーナー  
です。



標準医院価格 **¥6,700**

高純度安定型次亜塩素酸水

### トクヤマ デントジア 印象体除菌スプレー

印象体や石膏模型の  
表面を素早く除菌できる  
除菌スプレーです。



標準医院価格 **¥1,800**

標準医院価格

合計**¥453,200**を  
セットで

## 特別価格

※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。※価格は2021年10月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。※数に限りがありますので、期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

### トクヤマAPミキサーⅢ 新規導入キャンペーン 注文書

貴歯科医院名

お名前

お届け歯科商店名

ご住所 〒

TEL ( )

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

株式会社 **トクヤマデンタル**

お問い合わせ・資料請求  
インフォメーションサービス

本社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00(土日祝日を除く)

Webにもいろいろ情報載っています!!

トクヤマデンタル

検索

# アルジネート印象材は スイッチを押すだけ！



水・粉の計量 **不要!** + 手練和 **不要!**

デモ受付中!

HPでも  
動画で  
紹介中!



目で見ながら必要量の印象材を  
直接トレーに盛り付ける事ができます!


<https://www.tokuyama-dental.co.jp/doga/ap3/index.html>  
※一部機種では閲覧できない場合がございます。

## ● 使用後のお手入れもかんたん!


「攪拌子」、「外筒」についての印象材は、硬化後に清掃棒でかんたんに取ることができます。  
カクハンシ ガイトウ



攪拌子および外筒内の印象材は  
清掃棒を使用して押し出します。

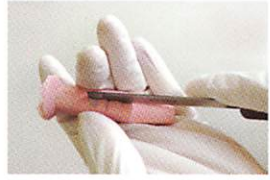

攪拌子に付着した印象材の硬化体  
に清掃棒で切り込みを入れます。

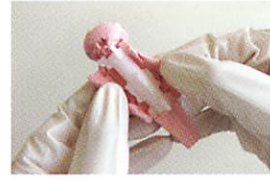

切り込み部分から硬化体を手で  
剥ぎとります。

## ● 印象材の稠度も5段階で調節可能!



硬い  
スタティモテルや義歯楕形印象  
(一次印象) に応用可能です。



普通  
寒天との連合印象や通常の有歯  
顎時印象等に適しています。



柔らかい  
総義歯や局部義歯印象時の二次  
印象等に応用可能です。


## ムラがなく、均一な練和物。かつ作業時間を短縮

◎ 気泡の混入がほとんどありません。



◎ 作業時間を短縮できます。

印象採得1回あたりの作業時間比較

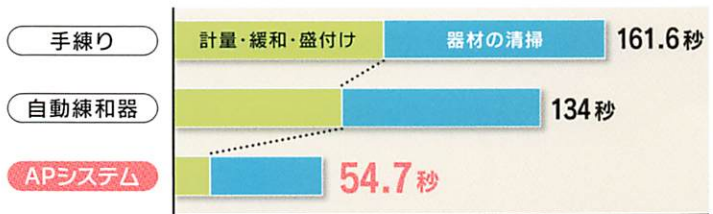

次城県鹿嶋市開業 田中晃伸先生 小林正憲先生 著  
「アルジネート印象材自動練和システム (APミキサーⅡ) の臨床における有用性」より  
(自動練和器は当社データによる)