

器 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科予防治療用ブラシ JMDN3576800

## ブラシコーン

### 【形状・構造及び原理】



[原材料]: 硬質白馬毛

### 【使用目的、効能又は効果】

#### [使用目的]

歯科衛生士及び歯科医師、又はそのどちらかが歯の清掃と研磨に用いることを目的とした、ブラシを備えた回転式歯科用器具をいう。

#### [効能又は効果]

本品は、口腔内歯面清掃用対応の硬質茶馬毛を使用した盃状RA用研磨ブラシで、歯面唇頬舌側・咬合面裂溝部の清掃研磨等が容易に行なうことが可能である。

### 【品目仕様等】

外観は本体全周にバリがなく、破損・変形・傷・ヒビなどの異常がないこと。

### 【操作方法又は使用方法等】

#### [使用方法]

歯科治療用コントラハンドピースに装着して使用する。また、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。

### 【使用上の注意】

#### 1. [使用方法に関連する使用注意]

本品が歯科治療用コントラハンドピースラッチ部に、ブラシの溝部が正確に装着されているか確認して使用すること。

**\* 必ず引っ張って見て確かめること。**

植毛部から絶対に毛を抜き加工をしないこと。

本品は長時間薬液消毒剤中に浸漬した場合、金属部が変色する事が予想されます。使用に於いては支障ありません。

本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。

研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。

本品の使用回転数は、10,000r.p.m.以下で使用すること。

研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。

**ブラシを強アルカリ・強酸性洗浄清掃液中に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあります十分注意すること。**  
**またマンドレール・ワッシャー等が腐食することが予想されますので十分注意すること。**

**\*\* 加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器)を使用し滅菌を行なうと、ブラシの柔軟性を失い使用できなくなりますので十分注意すること。また、過酸化水素液剤の使用は天然毛ブラシの脱色及び変質となります。 \*\***

本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。

本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

#### 2. [基本的使用注意]

器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。

使用前に必ず(保守・点検に係る事項参照)をすること。

使用目的(手術・処置・技工を含む医療行為)以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

**使用後は、器具に付着しているレジン・血液・体液・組織及び薬品等が乾燥しないうちに、直ちに拭取り洗浄液等に浸漬すること。**

**\* 本品の品質上、洗浄浸漬薬液等に十分注意すること。**

### 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

#### [貯蔵・保管方法]

水分・汚れが付着したまま保管しないこと。

本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

#### [使用期間等]

本品は、使用有効期間等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事が有るため安全管理上新しい物と適時交換する事。

### 【保守・点検に係る事項】

使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

### 【包装】

ブラシコーン/RA用: 10本入

ブラシコーン/RA用: 30本入

### 【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 株式会社 クロダプロダクツ

住 所: 〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

電話 番号: 03-3646-1734

FAX 番号: 03-3646-9207

製 造 業 者: 株式会社 クロダプロダクツ

住 所: 〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

### 【販売業者の名称及び住所等】

販 売 業 者: 株式会社 日本歯科工業社

住 所: 〒110-8530

東京都台東区上野5-12-8

取扱説明書等を必ずご参照ください。