

歯 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ホースブラウンレーズブラシ レジン用1列

【形状・構造及び原理】



[原材料]：硬質茶馬毛

【使用目的、効能又は効果】

[使用目的]

- 補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

【品目仕様等】

- 本品は、歯科技工物研磨作業時に技工用レーズに装着して使用する研磨用レーズブラシで、硬質茶馬毛を植毛した研磨ブラシは艶出し研磨等が容易に行なうことが可能である。

【操作方法又は使用方法等】

[使用方法]

- ① 歯科技工用レーズに装着して使用する。なお、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。

【使用上の注意】

1. [使用方法に関連する使用注意]

- ① 本品は、歯科技工用研磨レーズブラシです口腔内には使用しないこと。
- ② 植毛部から絶対に毛を抜き加工をしないこと。
- ③ 本品で研磨作業中に、歯科技工用レーズ筧部からブラシが外れない様に装着すること。
*** 必ず引っ張って見て確かめること。**
- ④ 本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。
- ⑤ 研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。
- ⑥ 本品の使用回転数は、5,000 r.p.m.以下で使用するこ
- ⑦ 研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。
- ⑧ **ブラシ用洗淨清掃液中に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがありますので十分注意すること。**
- ⑨ 本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。
- ⑩ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. [基本的使用注意]

- ① 器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。
- ② 使用前に必ず(保守・点検に係る事項参照)をすること。
- ③ 使用目的(手術・処置・技工を含む医療行為)以外は使用しないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ① 水分・汚れが付着したまま保管しないこと。
- ② 本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

[使用期間等]

- ① 本品は、使用有効期間等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

- ① 使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【包装】

- ホースブラウンレーズブラシレジン用1列：5個入。

【製造業者及び製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：株式会社 クロダプロダクツ

住 所：〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

電話番号：03-3646-1734

FAX番号：03-3646-9207

製造業者：株式会社 クロダプロダクツ

住 所：〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

【販売業者の名称及び住所等】

販売業者：株式会社 日本歯科工業社

住 所：〒110-8530

東京都台東区上野5-12-8