

フランチャーホイール

【形状・構造及び原理】



[原材料]: フランネル繊維・鹿皮

【使用目的、効能又は効果】

[使用目的]

補綴物等の研磨に用いる器材をいう。別に名称を定めるものを除く。

[効能又は効果]

本品は、歯科技工物研磨工程作業時に歯科技工用ハンドピースまたは、技工用レーズに装着して使用するHP用研磨ホイールで、フランネル繊維・鹿皮を交互に重ね合わせた本品は最終艶出し研磨等が容易に行なうことが可能である。

【品目仕様等】

外観は本体全周にバリがなく、破損・変形・傷・ヒビなどの異常がないこと。

【操作方法又は使用方法等】

[使用方法]

歯科技工用ハンドピースまたは、技工用レーズに装着して使用する。なお、必要に応じて研磨材を本品に塗布して使用すること。

【使用上の注意】

1. [使用方法に関連する使用注意]

本品は、歯科技工用ハンドピース及び技工用レーズに用いる研磨ホイールです口腔内には使用しないこと。

植毛部から絶対に毛を抜き加工をしないこと。

本品のマンドレールを絶対外さないこと。

本品が研磨作業中に歯科技工用ハンドピースまたは、技工用レーズチャッキング部から外れない様に装着すること。

*** 必ず引っ張って見て確かめること。**

本品を使用中、異常音発生時には直ぐに中止すること。

研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡を使用すること。

本品の使用回転数は、15,000r.p.m.以下で使用すること。

研磨効果を十分発揮させたい時には、本品を研磨材の種類別に分けて使用すること。

ブラシ用洗浄清掃液中に浸漬すると、本品の柔軟性を損なうことがあります十分注意すること。また、マンドレール・ワッシャー等が腐食することが予想されますので十分注意すること。

本品は、使用目的の用途記載以外は使用しないこと。

本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. [基本的使用注意]

器具の正しい使用のため、添付文書の注意・指示事項に従うこと。

使用前に必ず(保守・点検に係る事項参照)をすること。

使用目的(手術・処置・技工を含む医療行為)以外は使用しないこと。また、破折・曲がり等の原因になりますので使用時に必要以上の力(応力)を加えないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

水分・汚れが付着したまま保管しないこと。

本品は、歯科従事者以外は触れないように適切な保管・管理をすること。

[使用期間等]

本品は、使用有効期間等を特別定めていないため長時間使用により、材質の疲労・摩耗等で耐久性が低下する事があるため安全管理上新しい物と適時交換する事。

【保守・点検に係る事項】

使用(滅菌)前使用後に、汚れ・傷・曲がり等に異常がないか点検すること。

【包装】

フランチャーホイール/HP用: 12個入

【製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元: 株式会社 クロダプロダクツ

住 所: 〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

電話番号: 03-3646-1734

FAX番号: 03-3646-9207

製造業者: 株式会社 クロダプロダクツ

住 所: 〒136-0073

東京都江東区北砂3-4-4

【販売業者の名称及び住所等】

販売業者: 株式会社 日本歯科工業社

住 所: 〒110-8530

東京都台東区上野5-12-8

取扱説明書等を必ずご参照ください。