

グレージングに近い 光沢を再現!!

歯科用・ポーセレン専用ファイナルポリッシャー (チェア・ラボサイド兼用)

スーパースター

NET.7g

SUPER STAR

チェアサイドでポーセレン・キャストブルセラミック材等で修復された補綴物咬合調整後の艶出し研磨がグレージングに近い光沢を再現!! また、アロマセラピーのほのかな香りでリフレッシュ



定価¥4,800



歯科用・ポーセレン専用ファイナルポリッシャー (チェア・ラボサイド兼用)

スーパースター

NET.7g


SUPER STAR



特 徴


- ①ポーセレン専用最終艶出し研磨材。尚、キャストブルセラミック・ハイブリッド系硬質レジンにも対応可能。
- ②研磨力に優れているため光沢が一段と出やすく、チェアサイド・技工室での研磨作業が行い易くなります。
- ③固形型研磨材のため飛散が少なく、フェルトホイール・ポリッシングブラシ等に付着性が良い。
- ④アロマテラピーのほのかな香りでリフレッシュ

スーパースター研磨手順

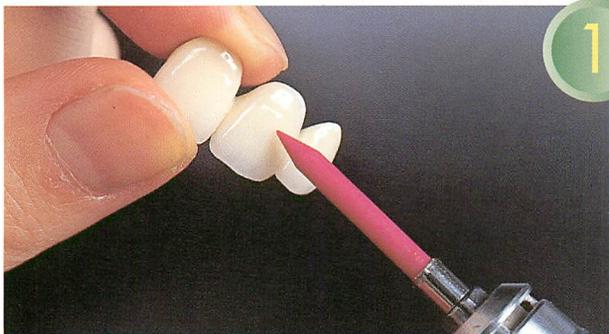

1

スーパーカラーポイントY15/R7/G4を用いて補綴物表面の傷を丁寧に取り除き滑沢にしてください。当研磨方法は、シリコンポイントを使用致しません。

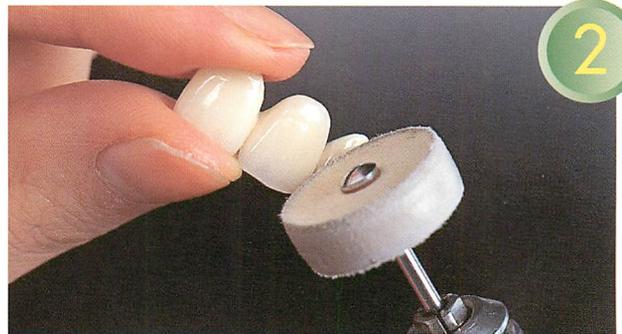

2

最終艶出し研磨時にスーパースターを低速回転で硬質フェルトホイール・フェルトポイント・ポリッシングブラシ等に付着させ、通常回転に戻し研磨を行ってください。グレージングを施したポーセレンと同等な光沢面になるまで発熱に注意しながら丁寧に研磨を行ってください。



3

最後にスーパースターが付着していないフランチャーホイールを用いて、軽く表面研磨を行う事で一層光沢が得られます。研磨後補綴物を45℃以上のお湯で十分洗浄して下さい。当研磨方法は、特にスーパーカラーポイントとスーパースターを用いる事で、グレージングに近い研磨効果が出ます。



ポーセレン艶出し
研磨ワンポイント

臼歯部の咬合面小窩裂溝部研磨時にはスーパーカラーポイントY15/R7/G4を用いて研磨を行ってください。スーパーカラーポイントは、ドレッサー等で先端の形態修正後、入念に咬合面研磨を行い、スーパースターをポリッシングブラシ・硬質フェルトホイール・フェルトポイント等に付着させて行う事で、咬合面艶出し研磨作業が行い易くなります。

※スーパーカラーポイントを用いて研磨する際には、Y15/R7/G4の順でご使用下さい。

- ※スーパーカラーポイント
- G4 グレー (超微細研磨用)
- Y15 イエロー (細研磨用)
- R7 レッド (微細研磨用)
- アソート (G4/R7/Y15)

お願い(使用上の注意)

- スーパースターは硬質固形タイプの研磨材です、使用後は速やかに容器の蓋をするようにして下さい。香りが失われる場合があります。また、研磨材の付着したフェルトホイール等のツールはポーセレン用または硬質レジン用に分けて使用して下さい。研磨付着層が異なるため十分な光沢が得られないことがあります。
- 本品は歯科技工以外には使用しないで下さい。
- 研磨作業時には、粉塵による人体への影響を避けるため、換気・排気装置を設け防塵マスク・保護メガネ等を使用し、粉塵を吸入しないで下さい。
- 本品を目に入れない様に注意して下さい。万一目に入った場合には直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けて下さい。
- 研磨後、補綴物を45℃以上のお湯で十分洗浄して下さい。
- 使用説明書及び添付文書に記載の用途以外には使用しないで下さい。 ※仕様及び価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。(2005.12.1現在)

スーパー 研磨関連商品	下村石膏	スーパーカラーポイント RA・HP	3本入・6本入
	クロダプロダクツ	ホースブラウン・ポリッシングブラシ RA	10本入
	クロダプロダクツ	フランチャーホイール	12本入
	多賀谷	ハッピーフェルトホイール 軸なし	12個
	茂久田	ポリラビット硬質フェルトポイント 58H・HP	12本入

製造販売元 下村石膏株式会社

〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-11-9

一般的名称: 歯科用研磨器材 販売名: スーパースター
届出番号: 11B3X00042000019 一般医療機器

株式会社 日本歯科工業社
発売元 〒110-8530 東京都台東区上野5-12-8
TEL. 03 (3836) 2191 FAX. 03 (3836) 2199

お問い合わせは 商品開発室までご連絡下さい。
TEL (03) 3836-2196 FAX (03) 3831-7054