

## NIKKOSHA 研磨材シリーズ

NIKKOSHA polish series

## POWER UP リニューアル 再デビュー

レジン・ポリカーボネート樹脂&メタル用で最終艶出し研磨をフォロー!!  
一度アクティブブライトに出会ってみませんか?

## レジン用研磨材

レジン専用のファイナルポリッシャーは  
濡れたような艶でデンチャーにピッタリ

アクティブブライト  
(レジン用)

ACTIVE BRIGHT

NET.50g×2



## 特徴

- ◆硬質レジン・床用（加熱・常温重合）レジン・ポリカーボネート樹脂対応の最終艶出し研磨材。
- ◆軟質タイプのためバフ・ブラシ等に付着性が良好。
- ◆飛散が少なく診療・技工室の環境に配慮。

## 金属用研磨材

歯科用・金属専用最終艶出し研磨材

アクティブブライト・  
メタル

ACTIVE BRIGHT・METAL

NET.50g×2



## 特徴

- ◆歯科用金銀パラジウム・銀合金対応の艶出し研磨材。
- ◆バフ・ブラシ等に付着性が良く、特に光沢度・洗浄性を重視した金属専用の艶出し研磨材。



# アクティブブライトレジン&メタル

## 特徴

◆アクティブブライトレジン&メタルは各材質に対応した2種類の専用研磨材で、特に艶の出しやすい樹脂系のポリカーボネートも容易に光沢が得られます。




## 研磨手順 — レジン義歯研磨例 —

### ステップ 1

カーバイトバー・シリコンポイント等で形態修正後、サンドペーパーを長方形にカットしペーパーマンドレルに挿み#280・400の順番で丁寧に義歯等の樹脂表面研磨を行います。


[ワンポイント] ペーパー研磨は一方方向に時間を掛け丁寧に行う事が重要です。

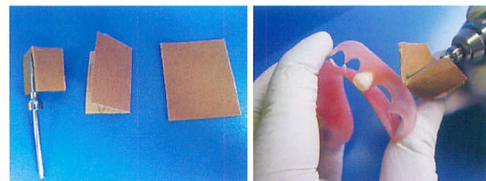

### ステップ 2

砂研磨工程は、超微細粒子タイプのケミサンドまたはエビスサンドでレーズ用バフ及びフェルトコーン等を併用し湿式下にて行います。

また、必要に応じて歯頸部や隣接移行部等の細部研磨はギヤールロビンソンブラシにケミブロックを付けて研磨を行ってください。

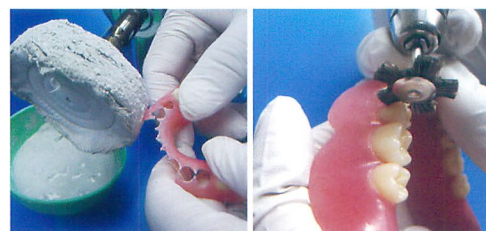

### ステップ 3

最終艶出し研磨工程では、本品アクティブブライトレジンまたはメタルを歯科用レーズやハンドピースに取り付けたフランチャーバフ、NIKKOフランネルバフ、フランチャーホイール、NIKKOフランネルホイールHP等に塗布し乾式下で艶出し研磨を行います。


●研磨効果を十分発揮させる為に、バフ・ホイール等は研磨材別に分けて使用してください。

[注] 研磨光沢度合いは、使用樹脂の種類による透明度・繊維色・厚み等で多少異なります。

[ワンポイント]

回転数・研磨圧・発熱等に十分注意しながら適した使用回転数の範囲内で研磨を行います。尚、研磨中に研磨物樹脂表面温度上昇により光沢が鈍る事も有りますので注意してください。

※[お願い] 本品のパンフレット・添付文書中では、研磨術式をレーズ研磨中心に紹介させて頂いておりますが、詳しいお問い合わせ等に付きましては下記連絡先・商品開発までご連絡ください。

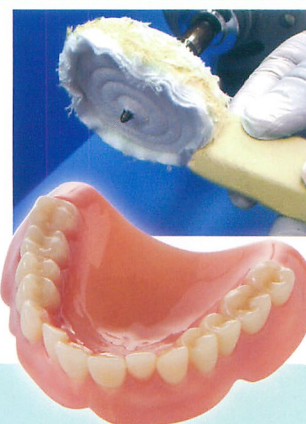

お願い

[使用上の注意]

- 本品に対する発疹・皮膚炎など過敏症の既往歴がある方は使用しないでください。
- 本品を使用前に添付文書を必ず参照してください。
- 研磨作業中は必ず、保護用防具眼鏡・マスクを使用してください。また、万一目に入った場合は直ぐに大量の流水で洗浄し眼科医を受診してください。
- 本品をパンフレット・添付文書上の記載用途以外には使用しないでください。
- 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないでください。

## アクティブブライトレジン・メタル研磨関連商品

発売元	商品名	包装単位	届出番号	製造販売元	
(株)日本歯科工業社	NSKケミサンド	2kg入	11B3X00042000015	下村石膏(株)	
	NSKエビスサンド	2kg入	11B3X00042000030		
	ケミブロック	固形研磨砂	40g×4		11B3X00042000016
	ギヤールロビンソンブラシ	HP用	6本入	13B3X00108001302	(株)クロダプロダクツ
	フランチャーバフ	レーズ用	1個	13B3X00108000502	
	NIKKOフランネルバフ	レーズ用	1個	13B3X00108000510	
	フランチャーホイール	HP用	12本入	13B3X00108000503	
	NIKKOフランネルホイール	HP用	12本入	13B3X00108001303	

※仕様及び価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

販売代理店

一般の名称：歯科用研磨器材  
販売名：アクティブブライトレジン  
届出番号 11B3X00042000017  
販売名：アクティブブライトレジン・メタル  
届出番号 11B3X00042000018  
一般医療機器

製造販売元  
**下村石膏株式会社**  
〒351-0015 埼玉県朝霞市幸町3-11-9

発売元



**株式会社 日本歯科工業社**  
〒110-8530 東京都台東区上野5-12-8  
TEL.03(3836)2191 FAX.03(3836)2199

お問い合わせは 商品開発室までご連絡ください  
TEL.03(3836)2196 FAX.03(3831)7054  
<http://www.kk-nikkosha.com>