

カビ(カンジタ菌)まで取り除く


デントパワー

義歯洗浄剤

爽やか・スツキリ
ミントの香り

1袋で一週間!!!

ノンクラスプデンチャー(金属バネのない入れ歯)
総入れ歯・部分入れ歯・マウスピース・矯正装置
など様々な使用できます

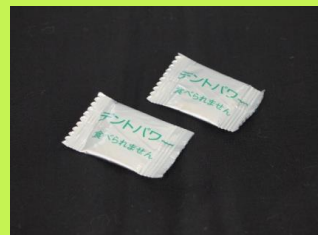

5ヶ月用

10ヶ月用



成分:ナトリウム・カリウム・マグネシウム・その他

「急性経口毒性試験＝安全性立証」

「抗菌力試験＝除菌効果立証」

「洗浄液の1週間後の細菌数試験＝除菌効果立証」

(いずれも(財)日本食品分析センターによる試験結果です)

義歯洗浄剤なら!!

デントパワー

洗浄力! 除菌力! が違う!!



洗浄前



洗浄後


ココが違います!

デントパワーの4大ポイント


- 1 カビ(カンジタ菌)を強力除菌
- 2 ミント効果でさわやか・消臭
- 3 強力な洗浄力
- 4 1袋で1週間使えるので経済的

検査で実証された高い除菌力

(財)日本食品分析センター抗菌力試験

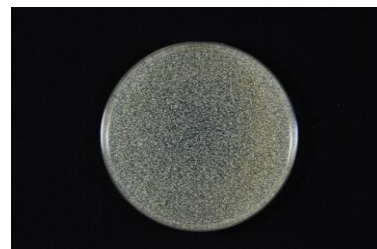

デントパワー
使用前
(細菌がいる状態)

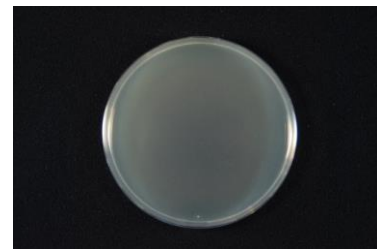

デントパワー
使用后
(細菌がいない状態)

使い方はカンタンです。



① 柔らかいスポンジ等で汚れを落とします。



② 180ccの水又はお湯(60℃以下)に1袋入れます。



③ 洗浄液に15分以上浸けて下さい。(材料に金属を使用している場合は最大で60分)



④ 洗浄後は流水で十分にすすいで下さい。

使用上の注意

- ・銀含有成分が多い歯科材料を用いている場合は、その部分が変色することがあります。この場合はただちに使用を中止してください。
- ・洗浄剤や溶液を口や目に入れしないでください。万が一入った場合十分に水で洗い流し、医師にご相談ください。
- ・アルミフィルムは使用直前に開封し、開封したまま放置しないでください。
- ・お子様の手の届かないところで保管して下さい。
- ・高温多湿にならない涼しいところで保管してください。
- ・義歯洗浄剤目的以外に使用しないでください。

●製造元 **株式会社ユニバル**

〒178-0063 東京都練馬区東大泉3-31-11 TEL03-3923-4186 FAX03-3867-6612