

エステセムⅡ ペースト トリプルパックキャンペーン

2026.7.21(火) > 8.20(木)

キャンペーン内容

保険点数
歯科用合着・接着材料Ⅰ
(レジン系/自動練和型)

〈材料料〉**36点**



ペーストA/B(ユニバーサル)
各2.3mL × 3本
合計 ¥29,400

+



ミキシングチップ
×**40個**

ミキシングチップ セメント用 40個
標準医院価格 ¥4,100

※臨床でのご使用には「ボンドマー ライトレスⅡ」が必要です。

上記セットを特別価格にてご提供！

※特別価格につきましては、お届け歯科商店様へお問い合わせください。

※エステセムⅡ 歯科接着用レジンセメント (管理医療機器) 認証番号228AFBZX00129000 ※一部キャンペーンを実施していない地域もございます。ご了承ください。
※価格は2026年7月現在の標準医院価格です。消費税は含まれておりません。 ※数に限りがありますので期間中でも打ち切らせていただく場合がございます。

エステセムⅡ ペースト トリプルパックキャンペーン

貴歯科医院名

お名前

ご住所 〒

TEL ()

弊社にご提供いただきました個人情報につきましては、弊社「個人情報保護方針」に従って厳正に管理し、ご本人様が拒否された場合を除いて、製品・サービスのご紹介を含むマーケティング活動に利用させていただきます。

エステセムⅡ オートミックスペーストユニバーサル 3本 +
ミキシングチップ キャンペーン

[キャンペーンコード:16125]

セット

お届け歯科商店名

株式会社 トクヤマデンタル

本 社 〒110-0016 東京都台東区台東1-38-9

お問い合わせ・資料請求 インフォメーションサービス

0120-54-1182

受付時間

9:00~12:00/13:00~17:00
(土日祝日を除く)


CASE 1

エンドクラウンの装着

(クリアランス確保が困難な最後方臼歯への応用)



(写真提供)
九州歯科大学
生体材料科学分野
加来 伸哉 先生

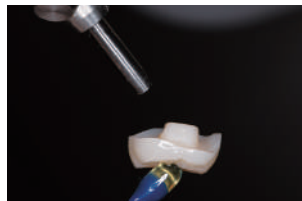


補綴装置(エステライトPブロック)
の被着面にアルミナサンドブラスト処理



補綴装置の被着面に
「ボンドマー ライトレスⅡ」を塗布し、
エアブロー(5秒)



ラバーダムを用いて防湿

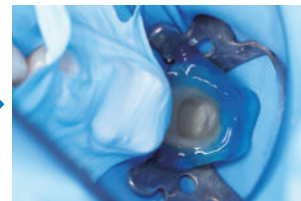

エナメル質への
セレクトイブエッチング



支台歯に「ボンドマー ライトレスⅡ」を
塗布し、エアブロー(5秒)



「エステセムⅡ」を用いて装着



装着後の口腔内写真

CASE 2

ジルコニアオーバーレイの装着


(ボンドマー ライトレスⅡ、エステセムⅡ使用)



(写真提供)
マイスター春日歯科クリニック
理事長
遠山 敏成 先生



接着前ラバーダムの装着(咬合面観)

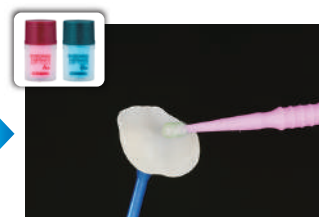

ジルコニアオーバーレイ内面へ
「ボンドマー ライトレスⅡ」塗布後、即時にしっかりと
エアブローを行い被膜厚さを薄くする(光照射不要)



歯面への「ボンドマー ライトレスⅡ」の塗布
同様に即時にエアブローを行う(光照射不要)



ジルコニアオーバーレイ内面へ
「エステセムⅡ」の填入



支台歯への装着・圧接後、
余剰セメントをある程度拭き取ってから
光照射を行う



オーバーレイ装着後の咬合面観



オーバーレイ装着後の頬側面観



ラバーダム除去直後咬合面観



◀ 上記症例を含むクリニカルケースレポートはこちら
(「ダウンロードページ」にございます。)

<https://www.tokuyama-dental.co.jp/products/products381.html>

歯科医療従事者向け 情報サイト+TD



接着修復についての動画を閲覧できます！

下記動画は歯科情報サイト「+TD」へご登録(無料)いただくことで閲覧可能となります。
「+TD」では動画以外にも記事、セミナー情報など様々なコンテンツを掲載しています。



会員登録は
こちらから！



ジルコニアオーバーレイの接着に化学重合という提案

遠山 敏成 先生



CAD/CAMインレーを成功させるRules

井畑 信彦 先生

